




## Інструкція

Заради вашої безпеки та ефективного використання даної продукції, будь ласка, прочитайте уважно інструкцію.

### 1.1. Основна блок-схема продукції

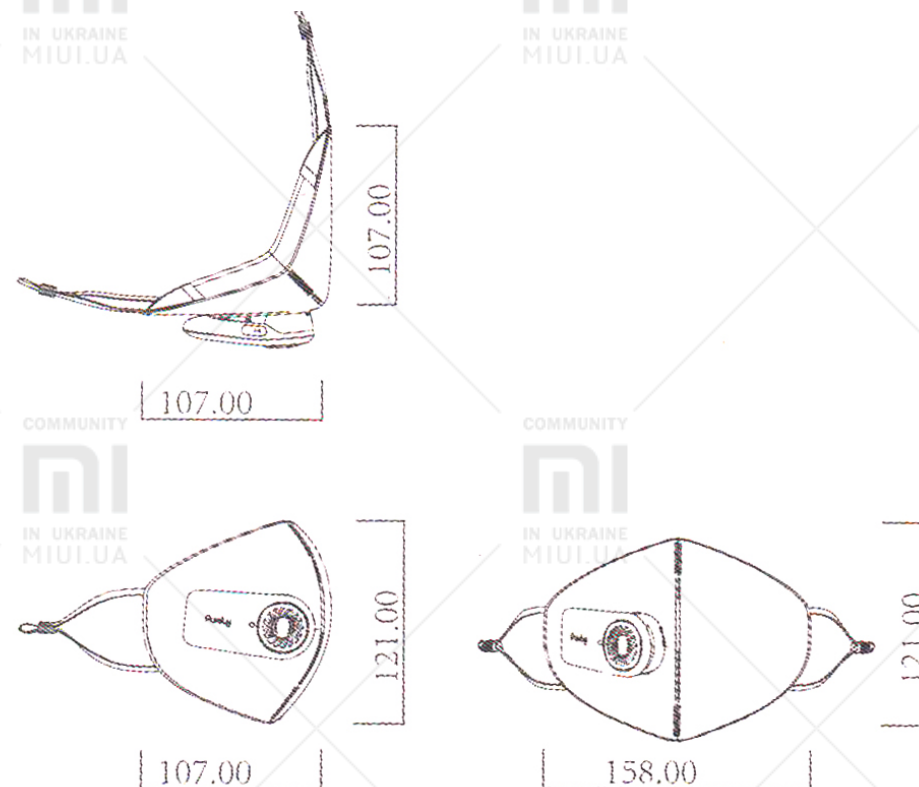

### Характеристики продукції

Технологія нанofібри з ефектом електрети дозволяє підвищити ефективність фільтрації частинок РМ 2.5 до 99%. Маска для очищення повітря Purely має чудовий глибокий ефект очищення, в той же час, за допомогою циркуляції, активно діє проти вологості, вихлопних газів.

Всеосяжне врегулювання питань скрутного дихання, задишки і т.д.

## 1.2. Складові частини продукції



1. S-вузол
2. Внутрішній затиск
3. Дихальний клапан
4. Система фільтрів маски
5. Чохол
6. Зовнішній затиск
7. Припливне повітря
8. Індикатор
9. Повітроочисний модуль
10. Кришка фільтра
11. Збірно-розбірний інструмент для кришки фільтра

## 1.3. Увімкнення/ перемикання режимів



Кнопка вимикача, а також перемикання режиму



Micro USB гніздо для зарядки

1. Кнопка вимикача, а також перемикання режиму знаходиться зверху, як показано на малюнку.
2. Для вимкнення пристрою потрібне тривале натискання кнопки в перебігу 1 сек. Маска забезпечена трьома швидкісними режимами, які ви регулюєте після натискання кнопки. Щоб вимкнути пристрій, безперервно натискайте кнопку більше 1.5 сек.
3. При вмиканні положення режиму буде залишатися таким, яким воно було перед попереднім вимиканням.

## 1.4. Інструкція по зарядці

1. При першому використанні необхідно зробити повну розрядку і зарядку пристрою.
2. При нормальній роботі пристрою, індикатор синього кольору повинен яскраво світитися. У разі миготіння індикатора синім кольором необхідна підзарядка.
3. Відкрийте пальцем USB порт, вставте зарядний кабель, щоб зарядити пристрій.
4. Під час підзарядки, індикатор червоного кольору повинен яскраво світитися. Коли згас червоний індикатор, це означає повний заряд.
5. Після закінчення підзарядки, будь ласка, закрийте гумову заглушку під USB-роз'єм.

## 2.1 Заміна повітроочисної фільтруючої пластини і розбирання




Руками або інструментом притисніть кришку фільтра, поверніть її проти годинникової стрілки, кришка фільтра автоматично вискочить;  
Зніміть кришку фільтра, і ви побачите повітроочисну фільтруючу пластину блакитного кольору;  
Вийміть стару фільтруючу пластину;  
Візьміть нову фільтруючу пластину і вставте її належним чином;  
Руками або інструментом візьміть кришку фільтра і повільно повертайте за годинниковою стрілкою до кінця.

## 2.2 Розбирання повітроочисного модуля, заміна фільтруючої маски



Міцно стисніть повітроочисний модуль і обертайте за годинниковою стрілкою;  
Повертайте до кінця, щоб була можливість зняти повітроочисний модуль;  
Міцно стисніть внутрішній і зовнішній затискачі;  
Розкрийте внутрішній затиск;  
Вийміть систему фільтрів, яку необхідно замінити.

## 2.3 Спосіб застосування запасної кришки, а також кришки фільтра

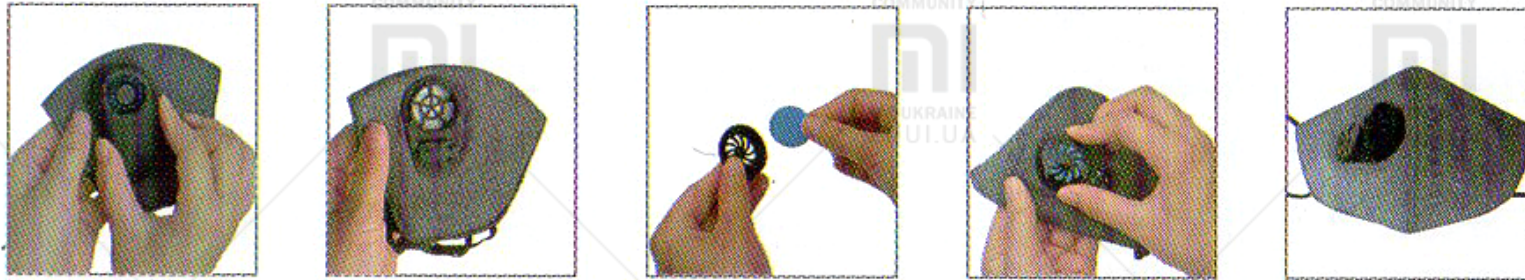

Міцно стисніть повітроочисний модуль і обертайте за годинниковою стрілкою;  
Повертайте до кінця, щоб була можливість зняти повітроочисний модуль;  
Витягніть запасну кришку;  
Одягніть кришку фільтра і обертайте її до клацання;  
Фільтруючу пластину з нанофібри з ефектом електрети можна використовувати окремо.

### Випадки, при яких гарантія не надається

1. Неавторизований ремонт, неналежне використання; удари, недбалість, помилкове використання, пошкодження, зміни, неправильне використання комплектуючих, розірвана етикетка або маркування;
2. Перевищення терміну гарантії;
3. Форс-мажорні обставини, які призвели до пошкодження продукції;
4. Пошкодження, які не відповідають «Списку несправностей продукції»;
5. Створені користувачем всілякі неполадки, установка нової системи і комплектуючих, які не входять до «Списку несправностей».

### Список несправностей

1. Виробничий брак;
2. Неможливо включити пристрій;
3. Індикатор не працює;
4. Кнопки пристрою не працюють;
5. Інші виробничі помилки.

## Найменування і вміст шкідливих речовин в продукції

| Найменування деталей | Шкідливі речовини |    |    |       |     |      |
|----------------------|-------------------|----|----|-------|-----|------|
|                      | Pb                | Hg | Cd | Cr 6+ | PBE | PBDE |
| Корпус               | 0                 | 0  | 0  | 0     | 0   | 0    |
| Печатна плата        | X                 | 0  | 0  | 0     | 0   | 0    |
| Проводка             | 0                 | 0  | 0  | 0     | 0   | 0    |
| Акcesуари            | 0                 | 0  | 0  | 0     | 0   | 0    |

### 2.4 Як правильно надягати респіратор:

1. Попередньо розтягніть ремінці перед тим, як його надягати. Переконайтеся, що затиск на ніс направлений вгору.
2. Притисніть респіратор таким чином, щоб він закрити підборіддя і ніс; закріпіть ремінці за вуха або використовуйте S-вузол для з'єднання ремінців, щоб маска щільно прилягала до обличчя.
3. Притисніть пальцями носовий затискач, щоб він щільно прилягав до перенісся.
4. Включайте маску для очищення повітря.

### 3. Специфікація продукту

Найменування продукту: Маска для очищення повітря Purely;  
Тип товару: HZSN001;  
Номінальна напруга: DC 5 V;  
Номінальна потужність: 0.4 B;  
Вага продукту: 50.5 грам;  
Розмір продукту: 75x37x13 мм;  
Чинний стандарт: Q / HZSN001-2016;  
Термін придатності: 3 роки;  
Матеріал: Поліестер поліпропіленове волокно, пластик;

### 3.1 Особливості

Літій-полімерний акумулятор: 550 мА / год;  
Час роботи: 4-8 годин;  
Тришарова структура  
Тихий ультратонкий вентилятор з тривалістю роботи 30000 годин;  
Примітка: респіраторні фільтруючі пластини слід міняти один раз на тиждень.

### Маска для очищення повітря Purely

WECHAT аккаунт: iPurely;  
ТОВ Ханчжоу Суйненг technology;  
Виробник: ТОВ Дунгуань Тянь Цзе;  
Адреса: Дунгуань, селище Чан'ань, мікрорайон Юн Тоу, вулиця Хун Е, номер 4.  
Офіційний сайт: [www.suineng.com.cn](http://www.suineng.com.cn)