



Miaomiaose


Короткий посібник користувача

1. Відскануйте код



Відскануйте QR-код для завантаження та встановлення мобільного додатку Miaomiaose

2. Підключення

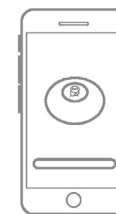

Дістаньте термометр, запустіть додаток Miaomiaose, натисніть на кнопку на екрані для встановлення з'єднання

3. Вимірювання температури




Наклейте двосторонню клейку стрічку на нижню частину термометра та наклейте його на місце **вимірювання температури***, розпочніть вимірювання

Рекомендоване місце для вимірювання температури

- Через різницю температури різних частин тіла, для більш точного вимірювання рекомендується наклеїти термометр на впадину низу середини грудей (дивіться малюнок зправа).
- Перед початком вимірювання температури, для створення більш кращого контакту термометра зі шкірою, злегка натисніть на корпус термометра протягом 3-5 секунд.

Увага!

- У новонароджених віком до 6 місяців дуже тендітна шкіра, через це для здійснення вимірювання температури не рекомендується наклеювати термометр. Використовуйте підгузок для закріплення термометра та переконайтеся що термочутлива пластина тісно прилягає до пахової зони.

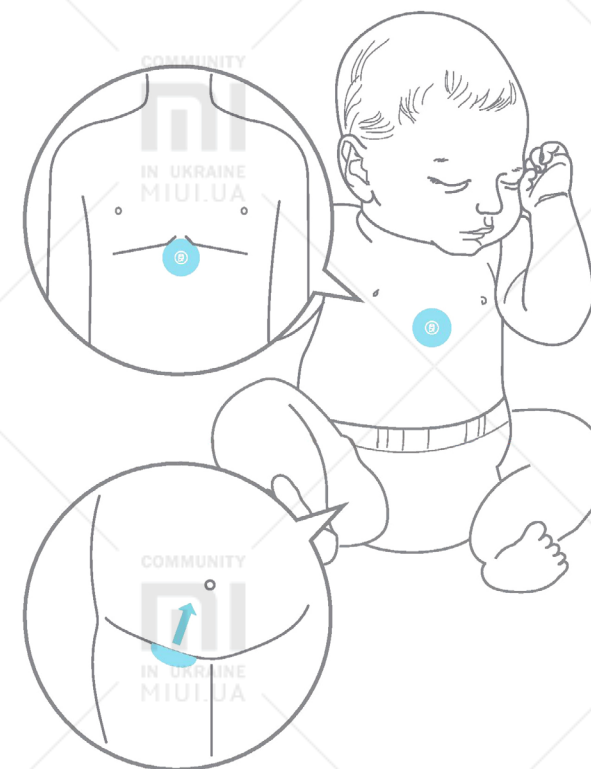


- Під час вимірювання температури, на телефоні має бути увімкнений звук, мобільний додаток має працювати в активному режимі (не заблокуйте екран та не переводьте додаток у фоновий режим).
- Під час вимірювання температури протягом ночі, для уникнення розряджання батареї та неможливості отримувати оповіщення, рекомендуємо Вам підключати смартфон до зарядного пристрою.
- Після закінчення вимірювання температури, для зменшення розряду батареї помістіть термометр в камеру для зберігання.


Як здійснити дистанційне вимірювання?

Крок 1 Додайте друга з акаунтом Xiaomi



1. Натисніть на іконку «⋮» в правому верхньому куті меню та виберіть опцію «Особистий кабінет»

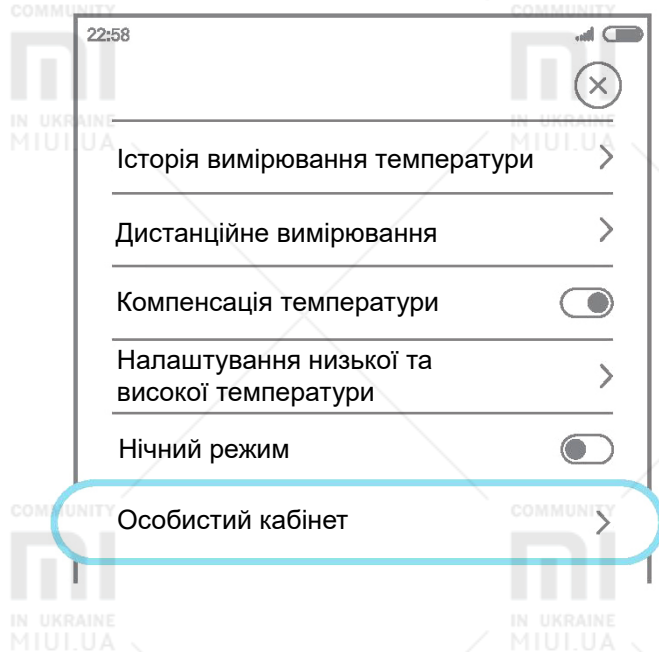

2. Натисніть на опцію «Друзі» для переходу до списку друзів

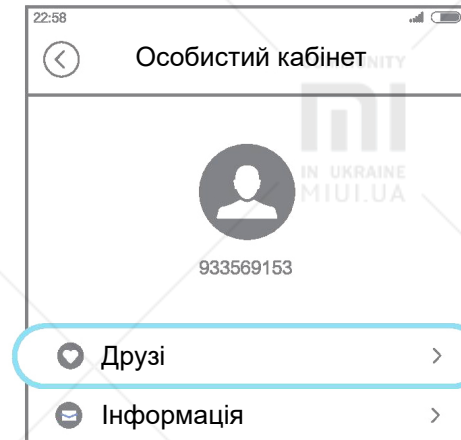


3. Натисніть на іконку «⋮» в правому верхньому куті меню «Друзі» й виберіть метод додавання акаунта друга

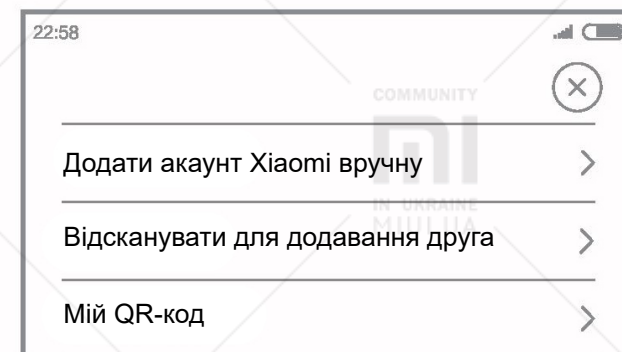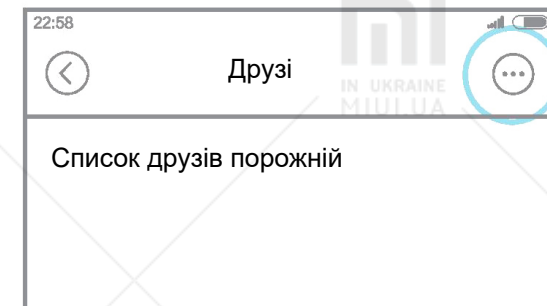


Крок 2 Розпочніть дистанційне вимірювання

4. Натисніть на іконку «⋮» у верхньому правому куті меню, виберіть пункт «Дистанційне вимірювання»

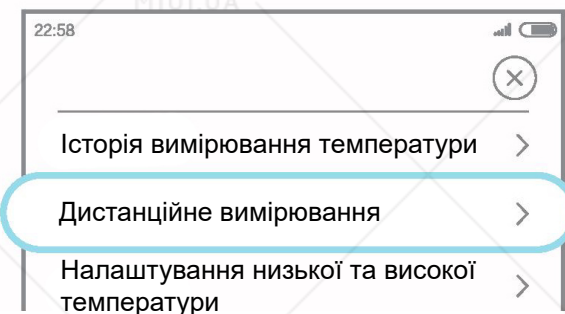

5. Виберіть акаунт для здійснення дистанційного вимірювання

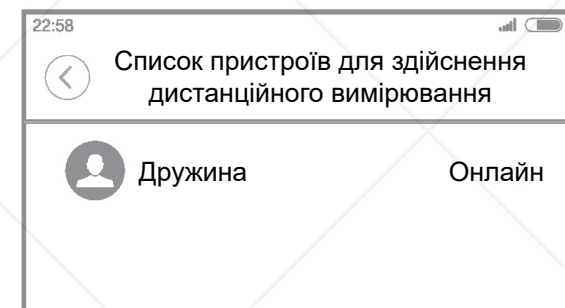


Примітка: нижче зазначено інструкції з налаштування функції компенсації температури, ознайомлюватися з даною функцією не обов'язково. У даному продукті використовується адаптивний розрахунок температури, що підходить для більшості осіб та умов вимірювання, якщо результат вимірювання відрізняється від фактичної температури, виконайте наступні кроки для компенсації температури.


Як виконати компенсацію температури?

1. Приклейте термометр MiaoMiaose до середини грудей, запустіть додаток MiaoMiaose та підключіться до термометра


2. За допомогою звичайного термометра вимірюйте температуру під пахвою протягом 10 хвилин, запам'ятайте результат вимірювання

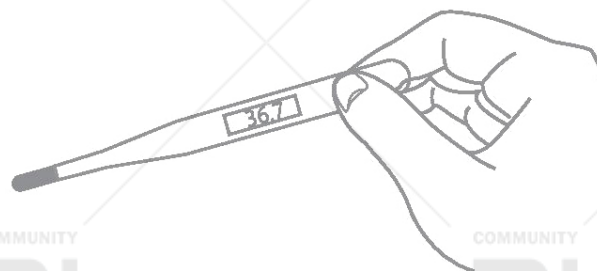


3. Натисніть на іконку «⋮» у верхньому правому куті меню, активуйте функцію «Компенсації температури»

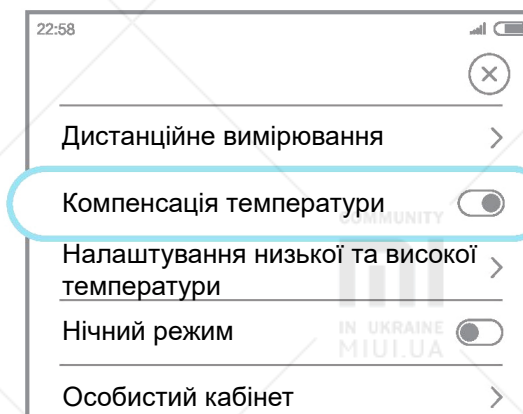

4. Поверніться на головний екран вимірювання, натисніть на кнопку компенсації температури « $\pm$ »

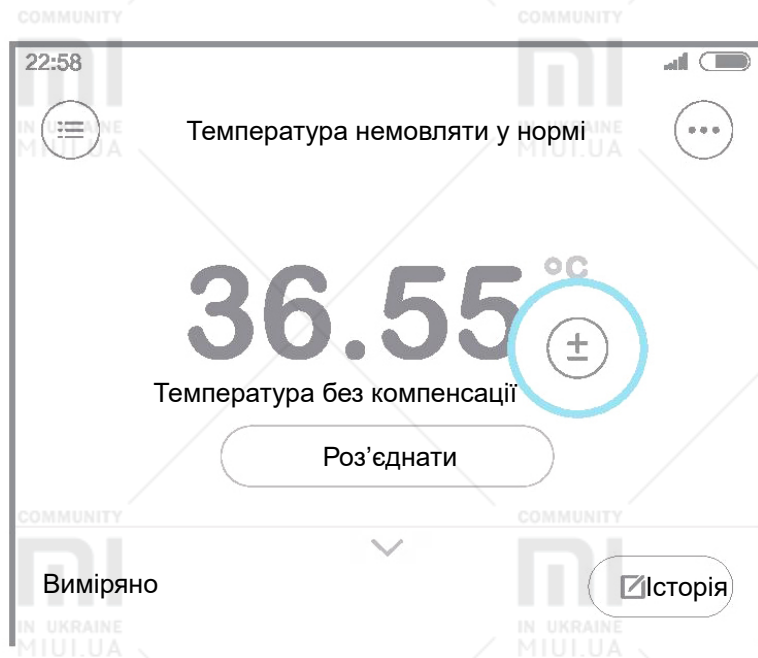

6. Після стабілізації вимірюваної температури, буде відображена температура з урахуванням компенсації

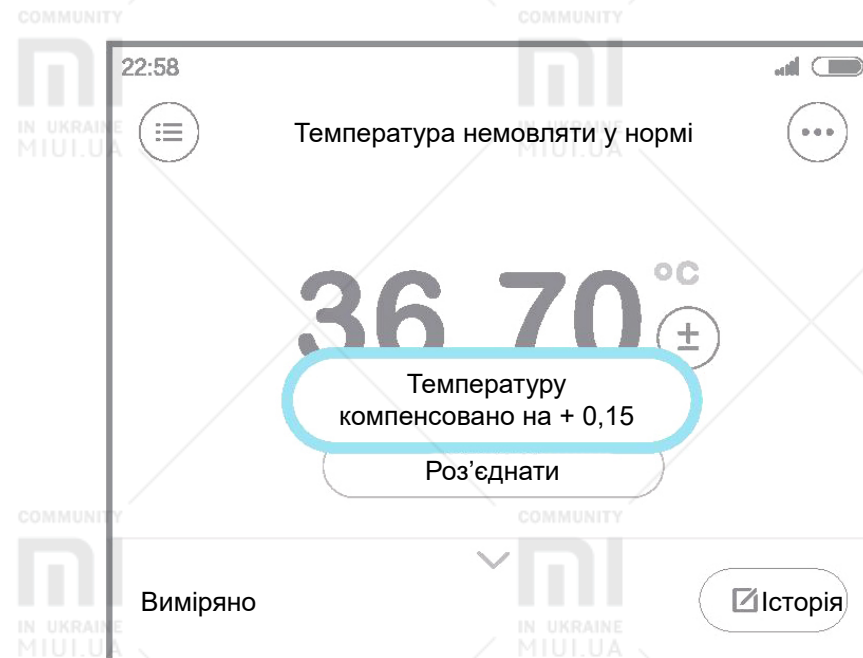

5. Натисніть на область відображення температури, введіть результати вимірювання звичайним термометром.

